


aycan web Importer Kurzreferenz

1 In tomedo®

Klicken Sie in der geöffneten Patientenkartei in der Symbolleiste oben auf **aycan web Importer**.
Im Browser öffnet sich das Fenster des web Importers.

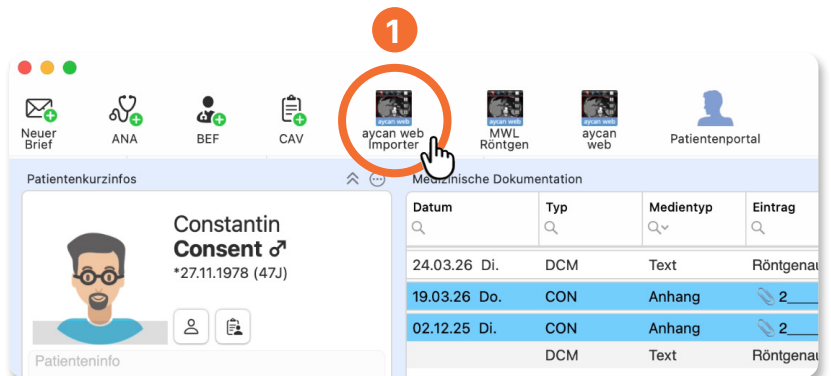


2 Im Finder

(macOS Dateisystem)

Navigieren Sie zu **Downloads** und ziehen Sie den gewünschten Ordner per **Drag & Drop** in das Browserfenster.

Das System verarbeitet die Daten und ordnet sie korrekt dem Patienten im Archiv zu.

Alternativ können Untersuchungen auch von einem **Laufwerk** (CD/DVD) ausgewählt werden. Klicken Sie dazu den Button **Auswählen** und wählen Sie anschließend das Laufwerk aus.

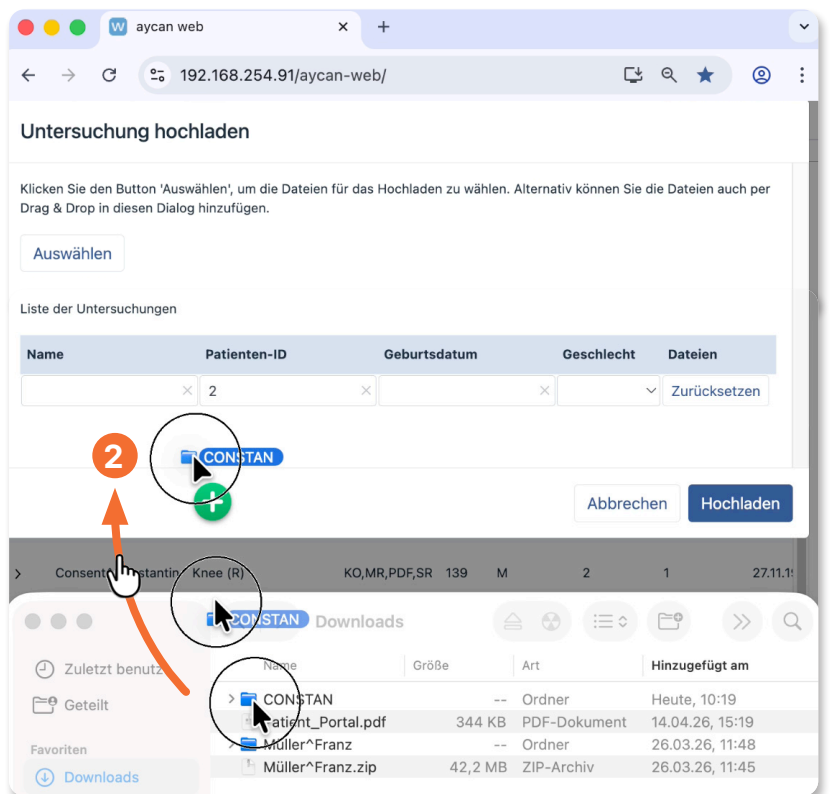

3 Im Browser

Die Patientendaten können Sie nun überprüfen.

Klicken Sie abschließend den Button **Hochladen**, um die Studien in das PACS zu senden.

